


Informationen für das Apothekenpersonal

SEA-BAND®

Wie wirkt das SEA-BAND Akupressurband gegen Übelkeit?

Das SEA-BAND Akupressurband basiert auf dem Prinzip der Akupressur. Dabei wird Druck auf verschiedene Punkte des Körpers ausgeübt. Diese liegen auf Energiebahnen, die den Körper durchlaufen. Die Stimulation dieser Punkte trägt zur Harmonisierung des Energieflusses bei, regt die Selbstheilungskräfte des Körpers an und führt zur Beseitigung von Beschwerden. So verhindert oder beseitigt Druck auf den Nei-Kuan-Punkt, 3 Finger breit unter dem Handgelenk verschiedene Formen der Übelkeit. SEA-BAND Akupressurband wird an beiden Handgelenken mit dem Knopf nach innen getragen. Es kann sowohl prophylaktisch, als auch bei bereits eingetretenen Beschwerden angelegt werden. Bei bereits eingetretenen Beschwerden tritt eine Linderung meist bereits nach wenigen Minuten ein.

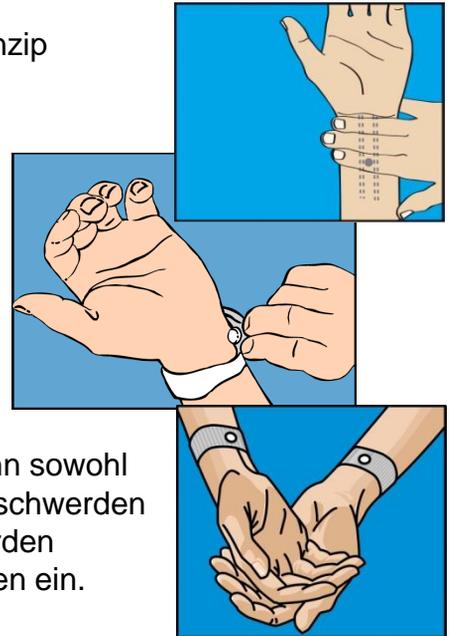

Die Wirkung von SEA-BAND Akupressurband ist in zahlreichen Studien dokumentiert.

Das Produkt wurde von Ärzten entwickelt und die Wirkung in zahlreichen klinischen Studien bestätigt. Angesehene Fachzeitschriften wie *Lancet*, *British Medical Journal*, *Ärzte Woche*, *Journal of the Royal Society of Medicine*, *Obstetrics and Gynecology* und das *British Journal of Anaesthesia* haben viele der Studien veröffentlicht.

Die Vorteile von SEA-BAND Akupressurband:

- Von Ärzten in der Praxis entwickelt
- Vielfach klinisch getestet
- Kein Medikament – keine Nebenwirkungen
- Hohe Wirksamkeit meist innerhalb weniger Minuten
- Jederzeit anwendbar

KLINISCH GETESTET
VON ÄRZTEN
EMPFOHLEN



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
EBVertriebs GmbH, Alte Reichsstr. 3f, 86356 Steppach
Tel. 0821-48676592, email: seaband@ebvertrieb.de, website: www.ebvertrieb.de

Wem sollten Sie SEA-BAND Akupressurband empfehlen?

Personen, die unter Reisekrankheit leiden

Insbesondere Kinder leiden bei längeren Autofahrten an Reiseübelkeit. Symptome: Gähnen, dann Übelkeit und Erbrechen. SEA-BAND Akupressurband eignet sich besonders, da im Vergleich zu den meisten Arzneimitteln keine Nebenwirkungen auftreten.

Schwangeren

70-80% aller Schwangeren leiden in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft an Schwangerschaftserbrechen. Symptome: Unwohlsein mit Übelkeit und morgendliches Erbrechen. Die meisten Schwangeren stehen einer medikamentösen Therapie aus Angst vor Nebenwirkungen insbesondere für das Kind äußerst skeptisch gegenüber.

Bei Migräneübelkeit

Übelkeit und Erbrechen während eines Migräneanfalls empfinden die meisten Betroffenen oft noch schlimmer als das Kopfweg selbst. Insbesondere Erbrechen verhindert oft die effektive Anwendung der Migränemedikation.

Bei Krankenhausaufenthalten

Nach Anästhesie:

Übelkeit ist eine der häufigsten Nebenwirkungen einer Narkose (in bis zu 60% der Fälle), insbesondere bei Augenoperationen, Ohroperationen, gynäkologischen, und Bauchoperationen.

Während der Chemotherapie:

Auftreten von Übelkeit ist abhängig von der Art und Menge des verwendeten Medikaments (Zytostatikum).

In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, den Körper nicht zusätzlich mit Nebenwirkungen von Antiemetika zu belasten.

Häufig gestellte Fragen:

Woraus bestehen die Armbänder? Acryl, Nylon und Lycra. Alle Garne wurden von der FDA auf Giftstoffe überprüft und freigegeben. Sie enthalten kein Latex (Allergische Reaktionen).

Müssen beide Bänder getragen werden? Ja. Ein Band führt bereits zu einem gewissen Effekt, aber beide Bänder sind wirksamer.

Ist die genaue Positionierung wichtig? Es ist besonders wichtig, dass der Knopf in der Mitte unterhalb des Handgelenks positioniert wird, da genau dort der Meridian verläuft. Der Abstand von der Handwurzel ist dabei weniger wichtig. Jedoch ist der P6 Punkt auf dem Meridian für die Kontrolle der Übelkeit besonders wirkungsvoll.

Wie lange kann man die Bänder verwenden? Sie sind sehr strapazierfähig. Es hängt davon ab, wie oft sie getragen und gewaschen werden. Sie sollten jedoch einige Jahre halten.

Wie lange können die Bänder getragen werden? Es gibt keine Beschränkung der Dauer der Anwendung. Sie können auch mit Unterbrechung getragen werden.

Sind die Bänder kindersicher? Ja. Die Qualität des Druckknopfes entspricht den Sicherheitsstandards wie die Augen von Teddybären. Damit können die Bänder auch von kleinen Kindern getragen werden.

Wodurch unterscheiden sich die Bänder für Kinder und Erwachsene? Im nicht benutzten (unge-dehntem) Zustand sind die Bänder gleich groß. Die Bänder für Kinder sind jedoch so gewebt, dass sie sich nicht so stark dehnen lassen wie die Bänder für Erwachsene. Viele Erwachsenen können auch die Bänder für Kinder tragen.

Gibt es Wechselwirkungen mit Arzneimitteln? Nein. Es gibt keine Kontraindikationen.

Wirken Sie bei allen Personen? Akupunktur und –pressur wirkt nicht bei jedermann. Anwendungsbeobachtungen zeigen eine Erfolgsrate von 80%. Bei einem deutlich höheren Prozentsatz tritt zumindest eine gewisse Linderung ein.

Wie stellt man fest, ob der Druck groß genug ist? Es gibt keine vorgegebene Druckstärke, da jeder Mensch den Druck anders empfindet. Dies ändert sich außerdem noch in Zusammenhang mit dem allgemeinen Gesundheitszustand des Menschen. Falls die Bänder nicht helfen, sollte alle paar Minuten zusätzlicher Druck oder Massage erfolgen.